

Safety-Multifly®

Gebrauchshinweis für die „Einhandtechnik“

Nach der Blutentnahme



Fixieren Sie den Schlauch mit den Fingern leicht in der Handfläche...



...und schieben Sie den Nadelschutz über die Kanüle...



...bis dieser mit einem deutlich fühl- und hörbaren "Klick" arretiert ist.


WICHTIG bei der Einhandtechnik

► Schlauch mit Fingern leicht in der Handfläche fixieren! ◀




Safety-Kanüle

Handhabungshinweis

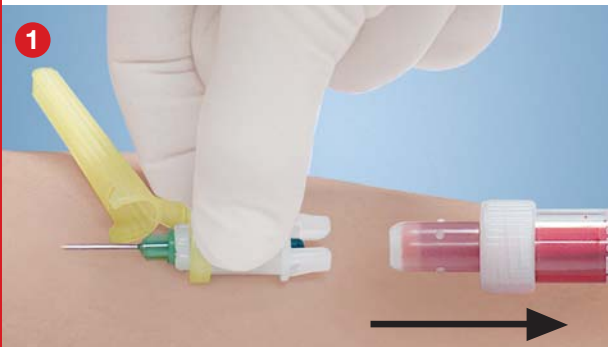

Nach der Blutentnahme

Lösen Sie die letzte S-Monovette® aus der Safety-Kanüle und ziehen Sie danach die Safety-Kanüle aus der Vene.

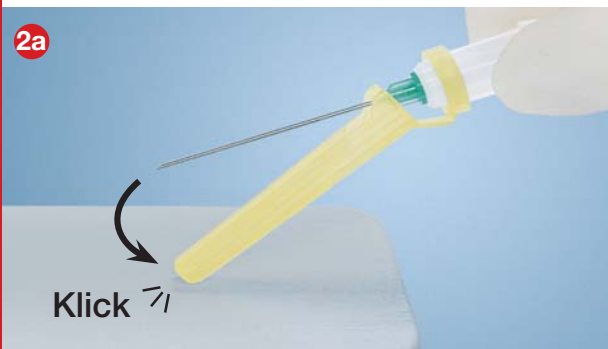

Fassen Sie die Safety-Kanüle am Adapter, setzen Sie den Nadelschutz auf einer stabilen, flachen Oberfläche auf und rasten Sie die Nadel nach unten durch leichten Druck bis zu einem deutlich fühl- und hörbaren "Klick" in den Nadelschutz ein.



Alternativ zu Abb. 2a können Sie auch den Nadelschutz mit dem Zeigefinger aktivieren.

Zur sicheren Funktion achten Sie bitte darauf, dass dies am unteren Ende des Schutzes geschieht.



Nach Aktivierung des Schutzmechanismus

Entsorgen Sie die gesicherte Safety-Kanüle in eine Entsorgungsbox.

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 30 50
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 30 50
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com