



Cleartest® Multi Drug Drogentest 6-Fach-Kassetten

WAHLWEISE MIT METHAMPHETAMIN ODER

METHADON ERGEBNISFELD

Der CLEARTEST® Multi Drug Test ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von 6 verschiedenen Drogen und Drogenmetaboliten in Urin.

Auswertung nach 3-5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Diese Drogen können Sie nachweisen:

1 MET Methamphetamin 1000 ng/ml

oder MTD wahlweise Methadon 300 ng/ml

2 COC Kokain - Benzoylgonin 300 ng/ml

3 THC Cannabis/Marihuana 50 ng/ml

4 MOP Morphin 300 ng/ml

5 BZD Benzodiazepin 300 ng/ml

6 AMP Amphetamin 1000 ng/ml

Testdurchführung:

1. Geben Sie 2-3 Tropfen Patientenerin in die Einfüllöffnungen der Testkassette.

2. Warten Sie bis zum Erscheinen der farbigen Linie(n). Das Ergebnis nach 3-5 Minuten auswerten.

3. Eine rosafarbene Linie erscheint in den Fenstern der Kontrollzone (C). Dies bedeutet, daß der Test korrekt ausgeführt worden ist. Wenn eine rosafarbene Linie in einer der T-Zonen der verschiedenen Drogensubstanzen erscheint, bedeutet dies ein NEGATIV-Ergebnis für die entsprechende Droge. Wenn in einer dieser Zonen keine Verfärbung durch einen rosafarbenen Streifen erscheint, bedeutet dies ein POSITIV-Ergebnis für die jeweilige Droge.

Type	PZN	VE	REF
Praxispackung Multi-Drug Methamphetamin	00358032	5 Teste	C3 23005
Vorteilpackung Multi-Drug Methamphetamin	00358061	10 Teste	C3 23000
Praxispackung Multi-Drug Methadon	00358322	5 Teste	C3 23015
Vorteilpackung Multi-Drug Methadon	00358339	10 Teste	C3 23010